





راهنمای استفاده از تخت ترکشن

- برای جابجا کردن تخت می توان با حرکت استپ چرخ به سمت بالا ، تخت را براحتی جابجا نمود.

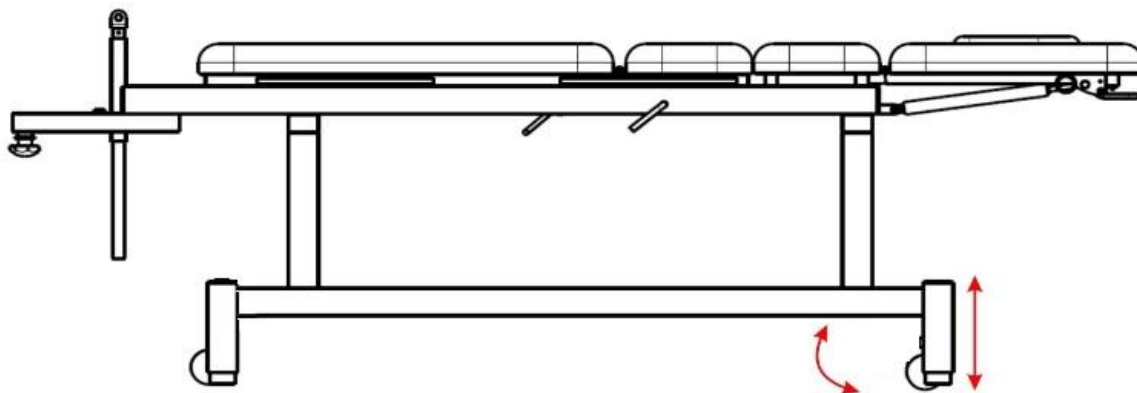


- نحوه اتصال استند به دستگاه ترکشن به صورت شکل زیر می باشد. جهت محکم کردن پیچ ها از آچار استفاده نمایید.

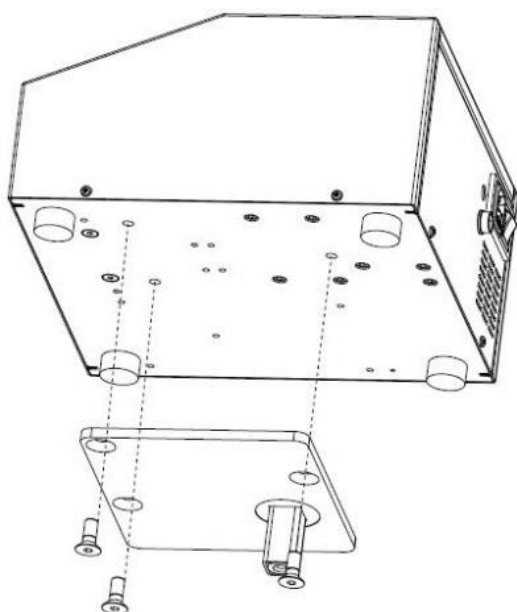




راهنمای استفاده از تخت ترکشن

- برای نصب دستگاه بر روی پایه تخت، سه حالت وجود دارد. دقت شود همواره پانل دستگاه رو به کاربر یا در امتداد تخت قرار گیرد. (پانل رو به دیوار نباشد) پس از نصب دستگاه پیچ های زیرین دستگاه به پایه محکم شوند.

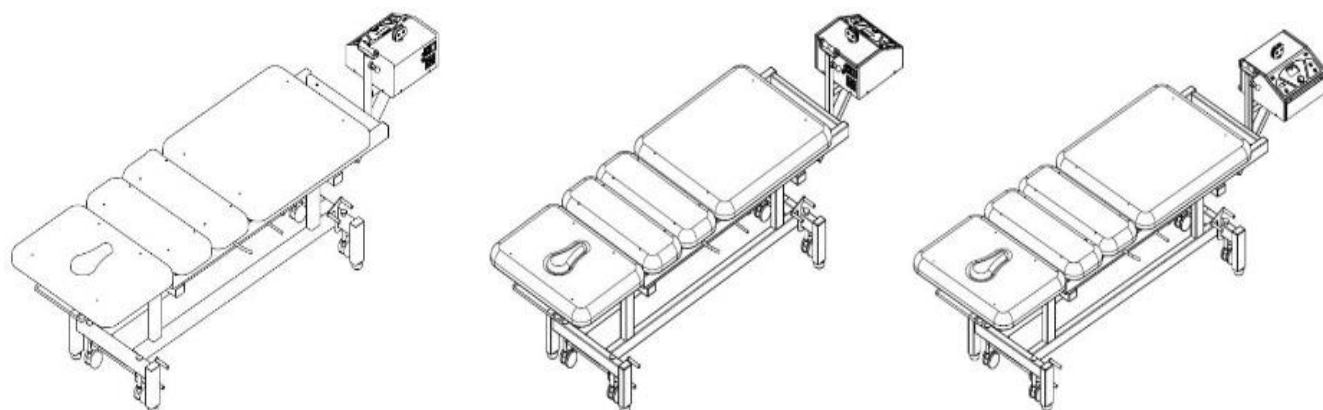


- جهت تنظیم ارتفاع میله راهنمای طناب لازم است با قابلیت روی میله را باز کرده و پس از تنظیم ارتفاع با قابلیت را ببندید. از آنجائیکه معمولاً یک طرف تخت رو به دیوار قرار می گیرد. پیشنهاد می شود با قابلیت تنظیم ارتفاع میله راهنما همواره به سمت کاربر باشد. (به طرف دیوار نباشد)

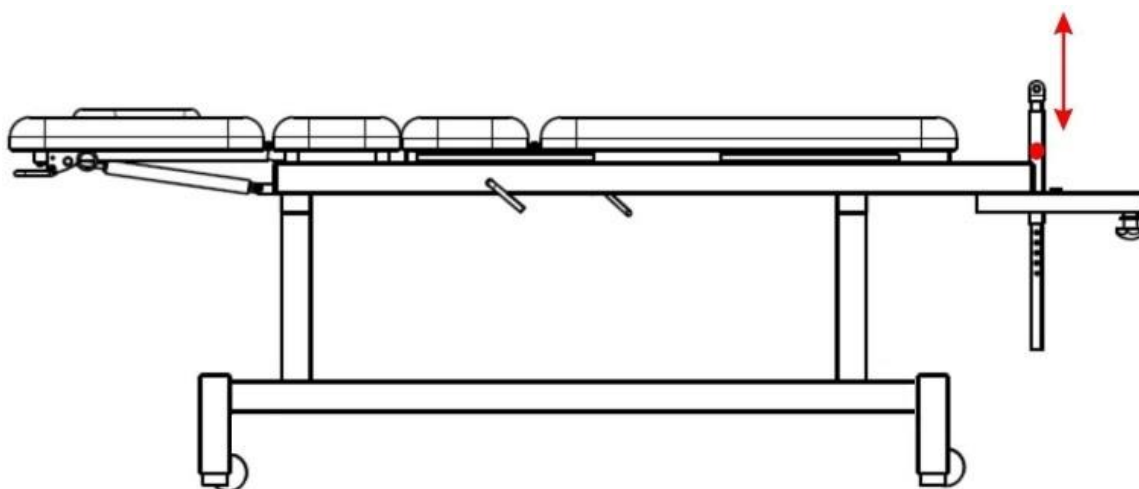




راهنمای استفاده از تخت ترکشن

- جهت تنظیم زاویه Head Section لازم است اهرم مربوطه را در جهت نشان داده شده حرکت دهید و زاویه دلخواه را تنظیم نمایید. (-50 to $+70$)

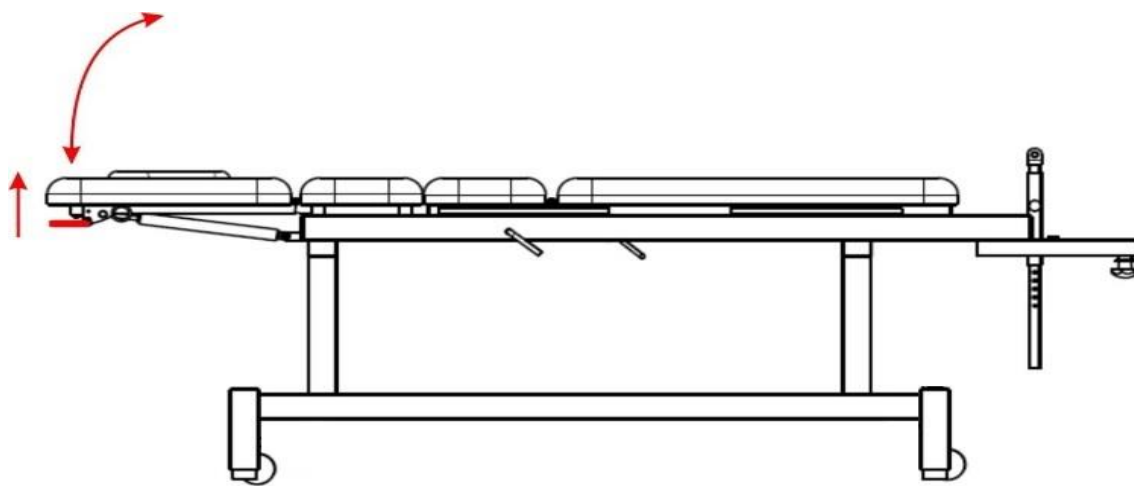


- جهت تنظیم زاویه Foot Section لازم است اهرم مربوطه را در جهت نشان داده شده حرکت دهید و زاویه دلخواه را تنظیم نمایید. (0 to $+87$)

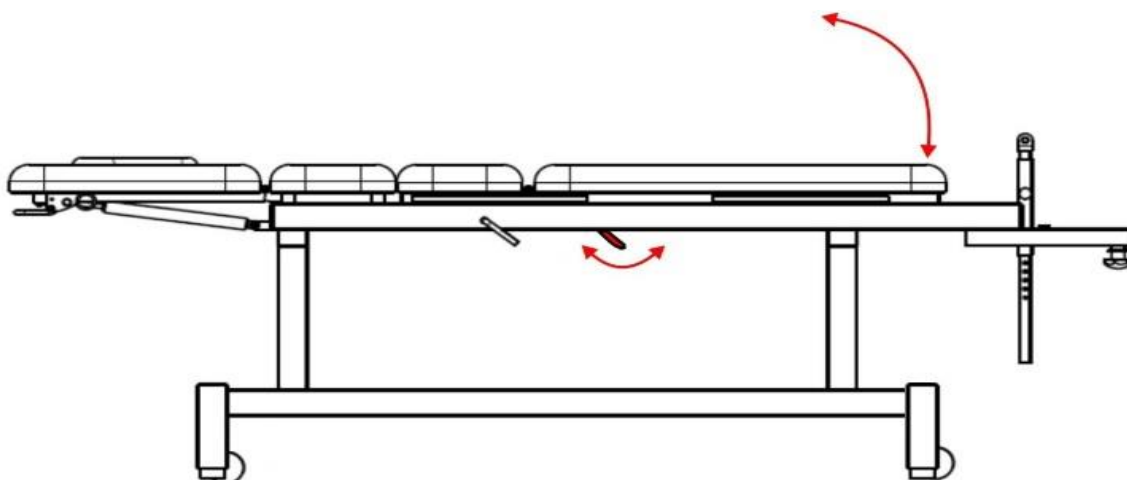




راهنمای استفاده از تخت ترکشن

● با توجه به اینکه قسمت کمری قابلیت جابجایی در طول را دارد، جهت ثابت نگهداشتن Foot Section با قابلیت دستگیره ترمز را در جهت نشان داده شده بچرخانید، در اینصورت ترمز عمل کرده و Section قفل می شود.

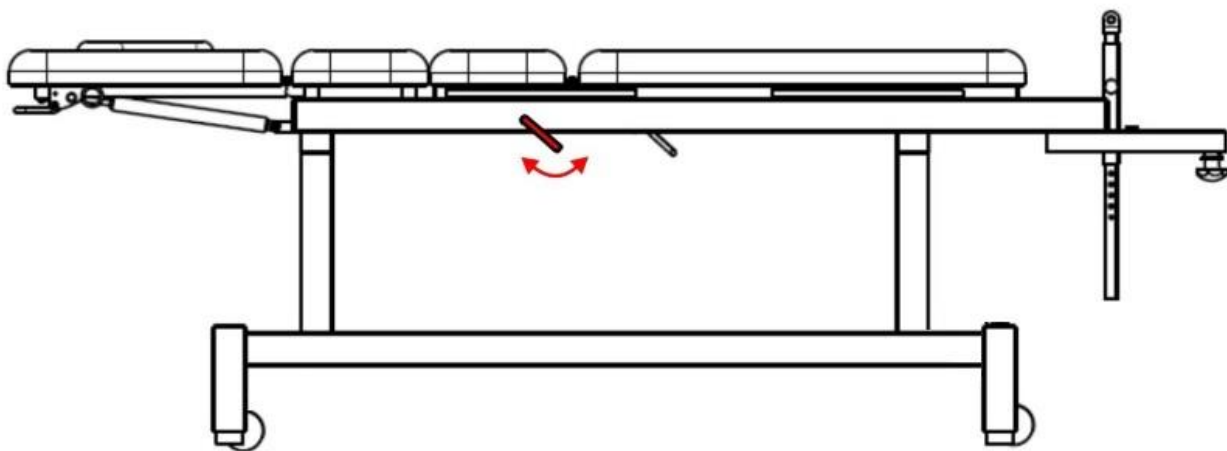

● در صورت نیاز به اعمال کشش گردن، میله راهنما را مطابق شکل به هم متصل نمایید.
توجه شود طناب دقیقا از روی قرقره ها عبور داده شود. همچنین به نحوه قرار گرفتن قرقره ها و جهت آن ها توجه شود.

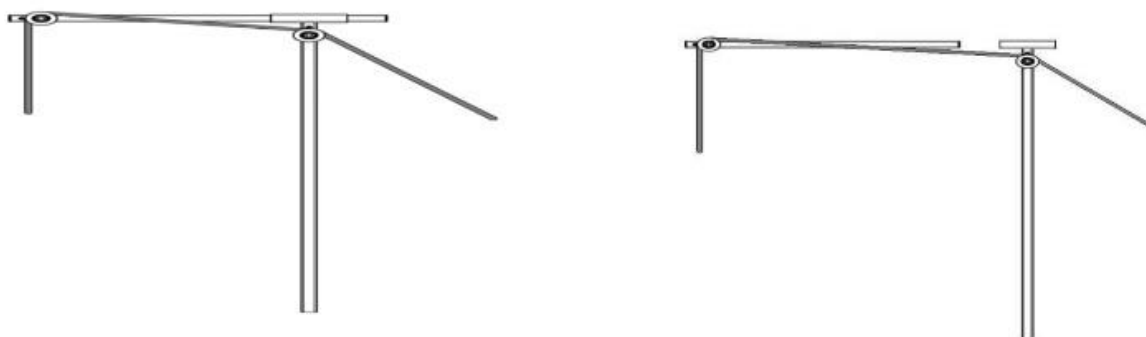

توجه : توصیه می گردد برای ضد عفونی کردن سطح تخت از محلول هایی با درصد حجمی الکل کمتر از ۴۰٪ استفاده